


## Instructie Prestan AED UltraTrainer.

**Omschakelen baby-/kinderreanimatie 30:2 naar baby-/kinderreanimatie 15:2**  
Het is mogelijk dat de AED-UltraTrainer is ingesteld op baby-/kindermodus 30:2. Deze kunt u omzetten naar 15:2 door middel van de volgende handelingen:

- Zorg dat de AED UltraTrainer uit staat voordat u begint.
- Druk op de baby-/kinderknop en houd deze knop ingedrukt (niet loslaten).
- Druk vervolgens op de Aan/Uit/Pauze knop en houd beide knoppen ingedrukt tot dat het toestel aangaat (2 lampjes lichten op boven de Aan/Uit/Pauze knop en de baby-/kinderknop). Wanneer het toestel aan gaat, laat u de knoppen los.
- Het toestel geeft nu aan: 'baby-/kinderreanimatie 30:2' of 'baby-/kinderreanimatie 15:2'.
- Druk vervolgens (snel) op de Baby-/kinderknop om de selectie te schakelen tussen baby-/kinderreanimatie 30:2 en baby-/kinderreanimatie 15:2.
- Zodra er een pieptoon klinkt is de selectie opgeslagen en wordt het toestel uitgeschakeld.

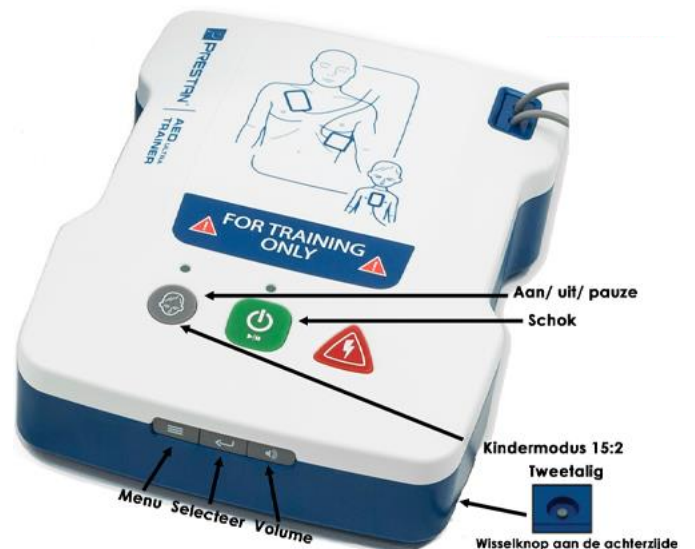

***Bekijk de volledige handleiding van de Prestan AED UltraTrainer in onze webshop.***