

Instructie handmatig verbinden LIFEPAK CR2 AED.

De status van uw LIFEPAK CR2 AED staat momenteel op 'verouderd'. Dit betekent dat uw CR2 AED gekoppeld is geweest aan een netwerk maar het laatste incheck moment heeft gemist. Door de AED handmatig te verbinden met het netwerk kunt u de status van de AED weer op afstand monitoren via LIFELINK.

Onderstaand wordt stap voor stap uitgelegd hoe u de verbinding handmatig kunt herstellen.

Verbinding handmatig herstellen:

- Uw LIFEPAK CR2 AED is voorheen verbonden geweest met een draadloos netwerk. De AED onthoudt het netwerk dus u hoeft niet opnieuw in te loggen op het netwerk om verbinding te kunnen maken.
- U haalt de AED naar een punt dicht bij de herkomst van het netwerk. Hier heeft u meer kans om de wifi-verbinding te herstellen.
- U opent de AED en zodra deze begint te praten drukt u tegelijkertijd de knoppen links en rechts van de aan/uit knop in (De taalknop & de baby/kind-knop). Vervolgens zoekt de AED verbinding en als alles goed is opgevolgd in de eerdere stappen, hoort u uiteindelijk de AED zeggen 'Communicatie voltooid, afsluiten'.
- Daarna hangt u de AED terug op de juiste plek.
- In het LIFELINK systeem kunt u altijd controleren of de AED correct is toegevoegd, de AED op uw locatie staat dan op 'gereed'.

De AED is nu gereed voor gebruik + verbonden met wifi-netwerk om te monitoren op afstand.

- Als het groene lampje knippert, is de AED stand-by en klaar voor gebruik.

Mocht er verder nog hulp nodig zijn bij het installeren van de AED's neem dan even telefonisch contact met ons op!



0495 – 56 34 45