

Werkinstructie LIFEPAK CR2 AED.

In de doos van de AED zit een startershandleiding (klein wit boekje) in plastic. Als u deze uit de plastic haalt, zit daar nog een tweede boekje achter waarop staat 'Draadloze configuratie van de AED'.

Daarin staat stap voor stap het onderstaande uitgelegd.

AED aansluiten op wifi-netwerk:

- Er is een LifeLINK account voor u aangemaakt, waar u automatisch een mailtje van heeft ontvangen voor het inloggen.
- Zodra u inlogt op het LifeLINK systeem, ziet u linksonder in het menu het kopje 'Resource Center'. Als u dit aanklikt kiest u voor de 'Wi-Fi Configuration Tool' en klikt u vervolgens rechtsboven op het pijltje naar beneden. U download dan de software.
- Nadat de software is gedownload en u het programma heeft geopend, moet u opnieuw inloggen met uw LifeLINK account.
- Als u bent ingelogd, volgt u de stappen voor het instellen van een primair netwerk op de LIFEPAK CR2 AED. Dit doet u door de kabel uit de doos in de AED en pc te steken en vervolgens de klep van de AED te openen en de stemcommando's te negeren. Als u dit correct doet, stopt de AED met praten en maakt deze verbinding met de software op de PC/laptop.
- Vervolgens kiest u in het programma voor het wifi-netwerk waarop de AED moet worden aangesloten en vult u het wachtwoord in. Nadat het juiste netwerk is toegevoegd, ziet u dat dit netwerk als primaire netwerk is toegevoegd.

VERBINDING MAKEN/HERSTELLEN:

- Als laatste stap opent u de AED en zodra deze begint te praten drukt u tegelijkertijd de knoppen links en rechts van de aan/uit knop in. Vervolgens zoekt de AED verbinding en als alles goed is opgevolgd in de eerdere stappen, hoort u uiteindelijk de AED zeggen 'Communicatie voltooid, afsluiten'.
- Daarna hangt u de AED op de juiste plek.
- In het LifeLINK systeem kunt u altijd controleren of de AED correct is toegevoegd, de AED op uw locatie staat dan op 'gereed'.

De AED is nu gereed voor gebruik + verbonden met wifi-netwerk om te monitoren op afstand.

- Als het groene lampje knippert, is de AED stand-by (voor 4 jaar)
- First Responder Kit (blauwe hulptasje) eventueel bevestigen aan AED

Mocht er verder nog hulp nodig zijn bij het installeren van de AED's neem dan even telefonisch contact met ons op!



0495 – 56 34 45